

La compresa fría reutilizable **COLD-PACK WME®** ofrece un método eficaz para aplicar crioterapia en área localizada. Los paquetes **permanecen flexibles y suaves incluso bajo cero**. El paquete mantiene su nivel de temperatura terapéutica hasta **treinta minutos**. Debe aplicarse siempre con una toalla o Funda WME®.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre	COMPRESAS FRÍO
Marca	WME® / MWE (Medical Wear Enterprise)
Material externo	Vinyl (PVC flexible)
Material interno (relleno)	Bentonita volcánica
Tipo de uso	Reutilizable
Tiempo terapéutico	Hasta 30 minutos por sesión
Certificación	CE – Blue Vinyl
Distribución	FISIOMED LTDA – Chile

MODELOS DISPONIBLES

MODELO	DIMENSIONES	FORMA	APLICACIÓN SUGERIDA
HALF-SIZE	18 × 28 cm	Rectangular	Zonas pequeñas / extremidades
STANDARD	25 × 30 cm	Rectangular	Rodilla, hombro, zona lumbar
CERVICAL	18 × 61 cm	Anatómico	Cuello / columna cervical
OVER-SIZE	38 × 61 cm	Rectangular	Zonas amplias / espalda completa

IMÁGENES DEL PRODUCTO

			
HALF-SIZE 18 × 28 cm	STANDARD 25 × 30 cm	CERVICAL 18 × 61 cm	OVER-SIZE 38 × 61 cm

INDICACIONES KINÉSICAS

INDICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Fase aguda	Control del dolor e inflamación post-lesión (primeras 48–72 hrs)
Post-quirúrgico	Reducción de edema y hematoma en zona tratada
Espasmo muscular	Disminución del tono muscular reflejo en contracturas
Recuperación deportiva	Manejo de esguinces y recuperación post-esfuerzo

MODO DE USO

1	CONGELAR	Colocar el pack en el congelador o unidad de enfriamiento. Permanece flexible y suave incluso bajo cero.
2	CUBRIR	Envolver el pack con una toalla o Funda WME® antes de aplicar sobre la piel del paciente.
3	APLICAR	Aplicar en la zona de tratamiento. Tiempo máximo recomendado: 20 minutos por sesión.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

⚠ PROTECCIÓN CUTÁNEA	Nunca aplicar directamente sobre la piel. Usar siempre una barrera textil (toalla o Funda WME®) para evitar quemaduras por frío.
⚠ TIEMPO DE APLICACIÓN	No superar los 20 minutos por sesión. Respetar descansos entre aplicaciones consecutivas.
⚠ CONTRAINDICACIONES	No usar en pacientes con alteraciones vasculares periféricas, crioglobulinemia o hipersensibilidad al frío.
⚠ ZONAS DE RIESGO	Precaución en zonas con pérdida de sensibilidad o trastornos circulatorios. Consultar al especialista.

FUNDAS / COLD PACK COVERS WME®

La cubierta **WME® Cold Pack** proporciona cobertura para compresas frías: previene irritaciones y quemaduras por congelamiento. Son más eficaces que las toallas y más suaves sobre la piel.

MODELO FUNDA	DIMENSIONES	COMPATIBLE CON
CERVICAL	18 × 28 cm	Cold Pack Cervical
STANDARD	51 × 71 cm	Cold Pack Standard / Over-Size