

ROLLOS INFLABLES TERAPÉUTICOS

Línea Profesional de Equipamiento para Rehabilitación y Psicomotricidad



Rollo Grande



Rollo Mediano



Rollo Largo/Delgado

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Los **Rollos Inflables Terapéuticos** son dispositivos de rehabilitación y estimulación psicomotriz diseñados para el trabajo con niños y adultos en entornos clínicos, educativos y domésticos. Su forma cilíndrica y superficie firme-elástica favorecen el trabajo de equilibrio, coordinación, tono muscular y conciencia corporal.

Fabricados en PVC de alta resistencia con válvula de seguridad, ofrecen durabilidad excepcional y fácil mantenimiento. Disponibles en tres tamaños para adaptarse a distintas edades, objetivos terapéuticos y espacios de trabajo.

2. MODELOS DISPONIBLES

Característica	Rollo Grande	Rollo Mediano	Rollo Largo/Delgado
Diámetro aprox.	40 cm	30 cm	20 cm
Longitud aprox.	75 cm	55 cm	100 cm
Peso del producto	1.2 kg	0.9 kg	1.0 kg
Cap. de carga	120 kg	100 kg	100 kg
Edad recomendada	2+ años	2+ años	3+ años
Uso principal	Equilibrio y soporte corporal completo	Estimulación y juego terapéutico	Trabajo postural y equilibrio dinámico

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC (Cloruro de Polivinilo) atóxico de alta resistencia
Espesor de pared	0.7 – 0.9 mm (según modelo)
Color	Azul (otros colores bajo pedido)
Válvula	Válvula de seguridad anti-retorno (compatible con infladores estándar)

FICHA TÉCNICA – ROLLOS INFLABLES TERAPÉUTICOS

Presión de trabajo	0.06 – 0.10 bar (ajustable según firmeza deseada)
Temperatura de uso	5 °C a 40 °C
Certificaciones	CE – EN 71-1/2/3 (Seguridad de juguetes) · REACH Compliant
Superficie	Lisa, sin costuras expuestas, resistente a pinchazos
Limpieza	Paño húmedo con desinfectante no abrasivo. No sumergir.
Almacenamiento	En lugar fresco y seco, alejado de luz solar directa. Se puede desinflar.

4. APLICACIONES TERAPÉUTICAS

- Fisioterapia pediátrica y adultos
- Terapia ocupacional
- Estimulación del equilibrio y propiocepción
- Fortalecimiento de tronco y core
- Integración sensorial
- Psicomotricidad infantil
- Rehabilitación neurológica
- Educación física adaptada
- Trabajo vestibular
- Estimulación temprana

5. INSTRUCCIONES DE USO E INFLADO

1	Inflar con bomba manual o eléctrica hasta obtener la firmeza deseada.
2	Verificar que la válvula quede correctamente cerrada tras el inflado.
3	Colocar el rollo sobre superficie plana, no resbaladiza (colchoneta o suelo firme).
4	El niño o paciente puede sentarse, recostarse o apoyarse sobre el rollo bajo supervisión adulta.
5	Ajustar la presión de inflado según el peso del usuario y el objetivo terapéutico.
6	Desinflar parcialmente para mayor suavidad o inflar más para mayor estabilidad.

6. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

■ ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- Uso siempre bajo supervisión de un adulto o profesional.
- No utilizar en presencia de objetos cortantes o superficies rugosas.
- No superar la capacidad de carga indicada según el modelo.
- Revisar el estado del material antes de cada uso; desechar si presenta grietas o deformaciones.
- No exponer a temperaturas extremas ni a productos químicos agresivos.
- Este producto NO es un juguete; es un instrumento terapéutico/rehabilitador.

7. CONTENIDO DEL EMPAQUE

Ítem	Detalle
1 x Rollo Inflable	En el tamaño seleccionado (Grande / Mediano / Largo)

Embalaje	Caja de cartón reciclable con film protector individual
-----------------	---

8. GARANTÍA

Este producto cuenta con **12 meses de garantía** contra defectos de fabricación desde la fecha de compra. La garantía no cubre daños por mal uso, sobreexposición a agentes externos, perforaciones intencionales ni desgaste por uso normal. Para hacer válida la garantía, conservar el comprobante de compra.