

# TUBOS MASTICABLES

## TERAPÉUTICO FLYAWAY

Forma de P • Silicona Médica • 4 Colores • Uso Fonoaudiológico

**Tubos Terapéutico Flyaway en forma de "P"** es un dispositivo fonoaudiológico de integración oral fabricado en **silicona médica 100% atóxica**. Su diseño ergonómico con múltiples texturas sensoriales (nódulos, crestas, pines y cerdas) proporciona estimulación oral multisensorial, facilitando la **regulación sensoriomotriz oral** en niños y adultos con necesidades específicas.

Indicado para integración sensorial oral, reducción de hipersensibilidad, estimulación de conciencia bucal y apoyo en el proceso de adquisición del habla. Disponible en **4 colores / texturas** para protocolos de estimulación progresiva. Resistente a temperaturas extremas (-40 °C a +200 °C) y esterilizable.



Set de 4 colores — texturas y resistencias diferenciadas

SILICONA MÉDICA

CE

FDA Aprobado

LIBRE DE BPA/LÁTEX

APTO TEA / TDAH

### 1. COLORES Y ZONAS DE TEXTURA SENSORIAL

Color	Zona del Arco	Zona Central	Zona del Mango	Extremo / Cepillo
VERDE Lima	Nódulos esféricos	Crestas en zigzag	Superficie lisa con branding	Micro-cerdas densas
AZUL Teal	Nódulos esféricos	Crestas en zigzag	Cuadrícula punteada	Micro-cerdas densas
AZUL Oscuro	Nódulos esféricos	Crestas en zigzag	Cuadrícula punteada	Micro-cerdas densas
BEIGE Natural	Nódulos esféricos	Crestas en zigzag	Micro-cerdas finas	Micro-cerdas densas



Agarre ergonómico — mango diseñado para control motor




Diseño apilable — 4 texturas progresivas

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Material</b>	Silicona grado médico — libre de BPA, PVC, plomo y ftalatos
<b>Dimensiones</b>	Alto: 9.9 cm • Ancho: 5.1 cm • Mango: 1.3 cm
<b>Zonas de textura</b>	4 zonas: nódulos, crestas zigzag, mango y micro-cerdas
<b>Colores / Set</b>	Verde, Azul teal, Azul oscuro y Beige — 4 unidades
<b>Temp. resistencia</b>	-40 °C a +200 °C — esterilizable en autoclave
<b>Limpieza</b>	Agua corriente, microondas, hervido, esterilizador
<b>Certificaciones</b>	CE • FDA • Libre de BPA / látex
<b>Edad recomendada</b>	Desde 12 meses — supervisión requerida < 3 años

### Product Size

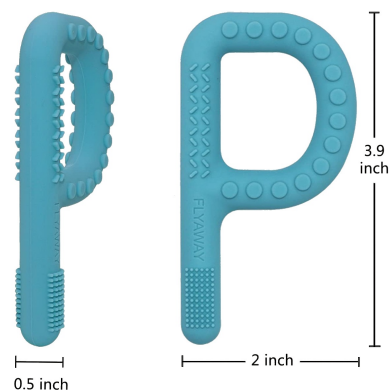

Dimensiones del mordillo FLYAWAY forma "P"

## 3. LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

- **Agua corriente:** lavar con agua tibia y jabón neutro después de cada uso.
- **Microondas:** colocar en recipiente con agua y calentar 2 minutos.
- **Agua hirviendo:** sumergir 5 minutos para esterilización profunda.
- **Esterilizador eléctrico:** compatible con esterilizadores de biberones estándar.
- **Temperatura máxima:** soporta hasta 200 °C sin deformarse ni liberar compuestos tóxicos.
- **Temperatura mínima:** resiste hasta -40 °C (apto para refrigeración en terapia de frío).
- **No usar:** cloro concentrado, solventes ni limpiadores abrasivos.
- **Almacenamiento:** en lugar limpio, seco y protegido de la luz solar directa.



*Métodos de limpieza y esterilización certificados*

## 4. BENEFICIOS TERAPÉUTICOS

■ <b>Regulación sensoriomotriz oral</b> — normaliza el tono muscular facial	■ <b>Regulación sensorial en TEA</b> — reduce conductas de morder objetos
■ <b>Reducción de hipersensibilidad oral</b> — desensibilización progresiva	■ <b>Estimulación de babbling</b> y producción de sonidos en pre-verbal
■ <b>Estimulación de conciencia bucal</b> y propiocepción orofacial	■ <b>Refuerzo de la succión/mordida</b> en recién nacidos y lactantes
■ <b>Apoyo en terapia miofuncional</b> — fortalecimiento musculatura oral	■ <b>Atención y regulación conductual</b> en TDAH mediante input oral
■ <b>Facilitación de la deglución</b> en disfagia leve	■ <b>Motricidad orofacial</b> — activación de labios, lengua y mejillas

## 5. INDICACIONES CLÍNICAS POR ESPECIALIDAD

Especialidad / Área	Indicación terapéutica
Fonoaudiología	Terapia de motricidad orofacial, habla, deglución y estimulación oral en todas las etapas
Terapia Ocupacional	Integración sensorial oral, regulación sensoriomotriz, desensibilización en hipersensibilidad
Psicología / TEA	Reducción de conductas de morder objetos inapropiados, regulación conductual mediante input oral
Neurología Pediátrica	Estimulación oral en parálisis cerebral, síndrome de Down y otras condiciones neurológicas
Neonatología / Pediatría	Estimulación oral en prematuros, refuerzo succión-deglución-respiración en recién nacidos
TDAH	Herramienta de regulación sensorial como apoyo a la atención y control de impulsos

## Educación Especial

Apoyo en aula para niños con necesidades sensoriales que requieren input oral continuo

## 6. PROTOCOLO DE USO SUGERIDO

1	El uso debe ser indicado y supervisado por fonoaudiólogo o terapeuta ocupacional habilitado.
2	<b>Inicio:</b> presentar el mordillo al paciente con la zona de micro-cerdas (extremo del mango) — textura más suave para de
3	<b>Progresión:</b> avanzar hacia la zona de nódulos del arco según tolerancia. Cada zona activa diferentes receptores mecan
4	Iniciar sesiones de 2–5 minutos. Aumentar progresivamente hasta 10–15 minutos según respuesta del paciente.
5	El mango en forma de "P" facilita el agarre autónomo del paciente y permite al terapeuta guiar el ejercicio.
6	Se puede usar frío (refrigerado a 4 °C) para mayor input sensorial o en procesos inflamatorios de encías.
7	Limpiar y esterilizar el mordillo antes y después de cada sesión. Un mordillo por paciente en uso clínico.

## 7. PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

### ■ ADVERTENCIAS CLÍNICAS IMPORTANTES:

- El uso debe ser **prescrito por fonoaudiólogo o terapeuta ocupacional** — no automedicar.
- **No dejar sin supervisión** a niños menores de 3 años durante el uso del mordillo.
- Inspeccionar antes de cada uso; **desechar si presenta cortes, grietas o deformaciones** visibles.
- **Contraindicado** en presencia de lesiones orales activas, aftas, heridas o post-cirugía oral reciente.
- Un mordillo por paciente en contexto clínico — no compartir entre pacientes.
- Ante signos de **hiperreactividad** (llanto, rechazo, arcadas): suspender y consultar al profesional.
- Este producto es un **insumo terapéutico**, no un juguete de uso libre ni un sustituto del chupete.

## 8. CONTENIDO DEL SET Y DISTRIBUCIÓN

Contenido	Descripción
4 x Mordillos FLYAWAY forma "P"	1 unidad por color: Verde lima, Azul teal, Azul oscuro y Beige natural
Guía de uso terapéutico	Con instrucciones de limpieza, protocolo básico y advertencias
Embalaje	Caja con ventana de visualización — packaging individual por mordillo
Distribución en Chile	FISIOMED LTDA — Especialista en Insumos Kinésicos y Fonoaudiológicos

### FISIOMED LTDA – ESPECIALISTA EN INSUMOS KINÉSICOS Y FONOAUDIOLÓGICOS

RUT: 76.184.288-9 | General del Canto #105 Of. 602, Providencia, Santiago de Chile

Correo: [ventas.fisiomed@gmail.com](mailto:ventas.fisiomed@gmail.com)

Especialista en Insumos para Rehabilitación Física, Fonoaudiología e Instrumentos de Evaluación Clínica