

ESPEJO PARA EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO

Con función de movimiento de mano | Mirror Therapy Box




1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre	Caja de Espejo para Ejercicio de Entrenamiento con Función de Movimiento de Mano
Otras denominaciones	Mirror Therapy Box / Caja de Espejo para Terapia Espejo
Categoría	Equipamiento de rehabilitación neurológica y kinesiológica de la mano y extremidad superior

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

La Caja de Espejo es un dispositivo de terapia espejo diseñado específicamente para ejercicios de entrenamiento de la función motora de la mano. El paciente ubica la mano afectada detrás del panel espejado y realiza movimientos de agarre, apertura y manipulación de objetos con la mano sana frente al espejo, generando la ilusión visual de que la mano comprometida se mueve con normalidad. Este mecanismo estimula la neuroplasticidad cerebral y favorece la reeducación motora de la mano en distintos contextos de rehabilitación.

Su estructura es plegable en forma de prisma triangular, con superficie reflectante de gran tamaño y base antideslizante, lo que permite ajustar el ángulo de visión según la posición del paciente y facilita la ejecución de ejercicios de manipulación fina (como sostener una pelota u objetos pequeños) durante las sesiones de entrenamiento.

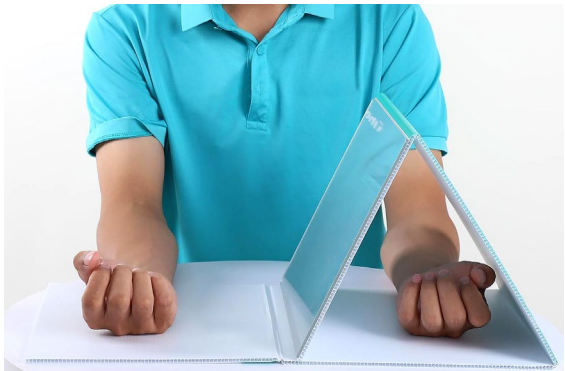


UNLOCKING RECOVERY AT HOME

- Reduce Phantom Limb Pain
- Improving Motor Function
- For Stroke Rehabilitation
- Hand Physical Therapy

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones del espejo	28 cm (ancho) x 30 cm (profundidad) x 32 cm (altura)
Dimensiones del empaque	36,4 x 30,5 x 6,3 cm
Peso	Aprox. 800 g
Material de la estructura	Panel tipo panal (honeycomb) en PVC, liviano y resistente
Superficie reflectante	Espejo acrílico de gran formato con película protectora removible
Diseño	Plegable en forma de prisma triangular, ángulo ajustable
Base	Antideslizante
Color	Turquesa / celeste con interior blanco

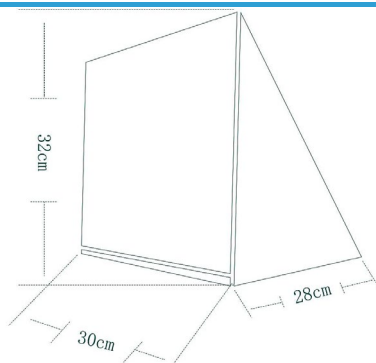

**Relieve pain symptoms
such as phantom limb pain
Improving hand and foot
mobility**



4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplia superficie de espejo para un campo visual óptimo durante los ejercicios de mano
- Ángulo de inclinación ajustable, adaptable a distintas posiciones del paciente
- Estructura plegable y liviana, fácil de transportar y guardar
- Base antideslizante que brinda estabilidad durante el uso
- Compatible con ejercicios de agarre y manipulación de objetos pequeños (pelotas, bloques, etc.)
- Diseño simple e intuitivo, apto para uso profesional y domiciliario



Product features



Green material



Collapsible



Light material



Easy to use

5. INDICACIONES CLÍNICAS Y USOS

- Entrenamiento de la función motora de la mano tras un accidente cerebrovascular (ACV) con hemiplejía o hemiparesia
- Manejo del dolor de miembro fantasma (phantom limb pain) en pacientes amputados
- Síndrome de dolor regional complejo (SDRC / CRPS)

- Lesiones nerviosas periféricas de la mano y el antebrazo
- Reeducción de patrones de agarre, apertura y manipulación fina
- Manejo del dolor postoperatorio y tensión muscular localizada en la mano
- Mejora de la propiocepción y control sensoriomotor de la extremidad superior



6. MODO DE USO

- Retirar la película protectora de la superficie del espejo antes del primer uso; de lo contrario, la imagen se verá empañada
- Ubicar la caja de espejo sobre una superficie plana y estable
- Colocar la mano afectada detrás del panel espejado, fuera de la vista del paciente
- Colocar la mano sana frente al espejo, dentro del campo de visión del paciente
- Realizar ejercicios de agarre, apertura o manipulación de un objeto (p. ej. una pelota) con la mano sana, observando el reflejo en el espejo
- Ajustar el ángulo del espejo según la sesión terapéutica indicada por el profesional tratante

7. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Uso bajo supervisión o indicación de un profesional de la salud (kinesiólogo, terapeuta ocupacional o médico rehabilitador)
- Retirar la película protectora únicamente al momento de iniciar el uso, para evitar opacidad en la superficie
- No apto para pacientes con fotosensibilidad severa sin evaluación previa
- Evitar golpes o presión excesiva sobre la superficie reflectante
- Limpiar con paño suave y seco; no utilizar solventes abrasivos
- Mantener fuera del alcance de niños sin supervisión

8. INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE CONTACTO

Distribuido por	FISIOMED Limitada
RUT	76.184.288-9
Dirección	General del Canto N° 105, Of. 602, Providencia, Santiago, Chile
Sitio web	www.fisiomed.cl

Este documento tiene fines informativos y de catálogo. Las especificaciones pueden variar según actualizaciones del fabricante.